

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**PRODUTO**

**CLEAR PRÉ LIMPEZA HOSPITALAR**

**DETERGENTE DE PRÉ LIMPEZA**

**PRODUTO DE USO PROFISSIONAL**

**COMPOSIÇÃO:** TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, UMECTANTE, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE E VEÍCULO.



Item	Especificação	Parametro de Conformidade
1	Aspecto	Liquido Limpido
2	Cor	Translucido
3	Odor	Inodoro
4	pH	7,0 a 9,0
5	Densidade	1,0 a 1,10 g/mL

**GALAO 5L - REFIL**

**PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS: N°  
25351.581538/2019-71**

**OUTRAS APRESENTAÇÕES**

**FRASCO 500 ML, FRASCO 750 ML  
SPRAY/ESPUMA, FRASCO 1 L**

### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

#### INDICAÇÃO

DETERGENTE DE PRÉ LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTAIS QUE AGUARDAM A LIMPEZA EFETIVA, EVITANDO A FORMAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES E ADERÊNCIA DE MATÉRIA ORGÂNICA. UMEDECE E AMOLECE OS RESÍDUOS DOS INSTRUMENTAIS E OU EQUIPAMENTOS.

EVITA A FORMAÇÃO DE BIOFILMES.

PODE SER USADO EM TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS INCLUSIVE AÇO INOX.

NÃO CORROSIVO.

FACILITA E DIMINUI O CUSTO E TEMPO DE LAVAGEM.

#### MODO DE USO

PRODUTO PRONTO PARA USO. CLEAR PRÉ LIMPEZA HOSPITALAR PODE SER APLICADO IMEDIATAMENTE APÓS O USO DOS INSTRUMENTAIS, APLICAR O PRODUTO DIRETAMENTE NA SUJEIRA DOS ARTIGOS E EQUIPAMENTOS, UMEDECENDO – OS, DEIXE EM CONTATO COM O PRODUTO ATÉ QUE POSSA SER INICIADA A LIMPEZA COMPLETA MANUAL OU POR MÁQUINAS. CASO, HAJA A NECESSIDADE APLIQUE MAIS CLEAR PRÉ LIMPEZA HOSPITALAR PARA MANTER OS INSTRUMENTAIS ÚMIDOS. ENXAGUAR OS ARTIGOS EM ÁGUA CORRENTE ANTES DA LIMPEZA COMPLETA. UTILIZAR O PRODUTO EM TEMPERATURA AMBIENTE. PRODUTO NÃO CORROSIVO PARA METAIS, AÇO INOX, ALUMINIO, LATÃO, FERRO E COBRE.

**VALIDADE:** 36 meses, a partir da data de fabricação, desde que mantidas as condições de estocagem na embalagem original.